

Utilisation du Lecteur NOVA



Nettoyer et Sécher le doigt du patient



Insérer la bandelette neuve



Vérifier l'intégrité de l'écran



Piquer le doigt



Faire le test dans les 2 min



Lire le résultat



Éjecter la bandelette

POINTS CLÉS



LO/HI Résultats hors limite
(0,3 mmol/L) < Lac > (20 mmol/L)



"M" Mémoire : Appui court
"M" Configurer le lecteur : Appui long
▶ Navigation et mode "CQ"



Apparition du symbole : changer la pile rapidement (10 tests restants)

Dépannage Rapide

Codes Erreurs	Cause	Action
E4	Volume échantillon insuffisant	Prélever à nouveau et maintenir le contact avec le sang jusqu'au BIP
E0-E1	Défaillance logicielle ou analyseur	Remplacer le lecteur
E2	Température hors limite	Adapter la T°C de fonctionnement : entre 15 & 40° C
E3-E5-E8-E9	Bandelette défectueuse	Changer de bandelette
Contrôle hors intervalle : utiliser le mode "CQ" , agiter par renversement 10x, répéter le test avec un nouveau flacon CQ, puis de bandelettes		



Support Hotline (24h/24 – 7j/7)
01 64 86 48 25
FR-support@novabio.com

Conservation après ouverture :
(entre 15-30° C)

Electrodes et Contrôles: **3 mois**