

Changement flacons d'hémocultures

Rappel des bonnes pratiques de prélèvements des hémocultures en ponction unique chez l'adulte



Aérobie Anaérobie
4 flacons
Sauf endocardite



LBM du Centre Hospitalier R. Bisson
4, rue Roger Aini CS 97223 14107 LISIEUX Cedex
Ref : HC2-ENR014 Version : 02 Applicable le 14-02-2023



1

Retirer la capsule de protection sur le bouchon des flacons



Désinfecter les bouchons et laisser sécher 30s




Friction des mains




Détersion au savon antiseptique, rinçage à l'eau stérile ou au NaCl 0,9%.
Séchage avec des compresses stériles
Antiseptie à l'aide de compresses stériles imbibées d'un antiseptique alcoolique. (respecter le temps de séchage)

2

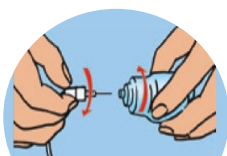


VISSER à fond l'adaptateur BacT/ALERT au dispositif de prélèvement

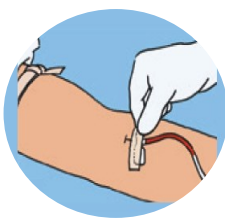

Pratiquer la ponction veineuse à l'aide de l'aiguille



- 1) Placer l'adaptateur sur le flacon **aérobie** en pressant le long du flacon. **Remplir jusqu'au repère visuel.**
Mettre n°1 sur le 1^{er} flacon
- 2) puis remplir les 3 autres flacons jusqu'au repère visuel.

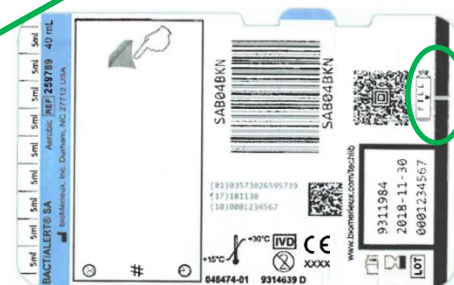

3




Retirer le dispositif de prélèvement des flacons. Désinfecter à nouveau les bouchons des flacons. **Mélanger doucement** 2/3 fois chaque flacon


Identifier les prélèvements.

Coller les étiquettes dans le sens de la largeur des flacons en alignant le haut de l'étiquette avec le B de « Bact ».

Zone de collage pour étiquette patient

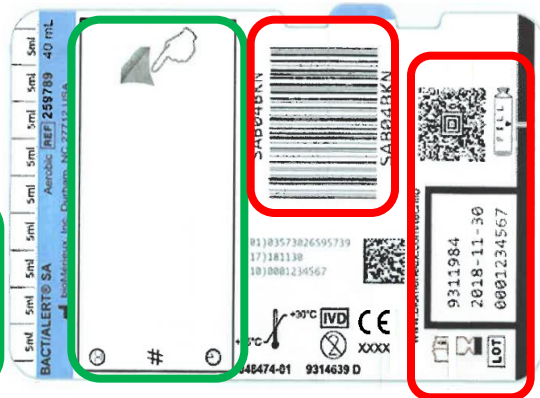

Ne pas masquer

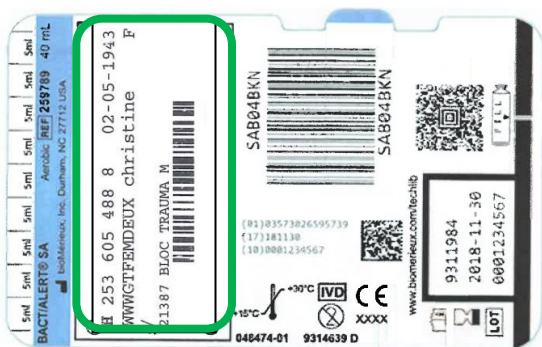

Ne pas écrire sur le fond des flacons